




1 Ballons zusammenfalten



Uterusballon locker um und über die Spitze falten. Vaginalballon zusammenfalten.

2 Uterusballon einführen

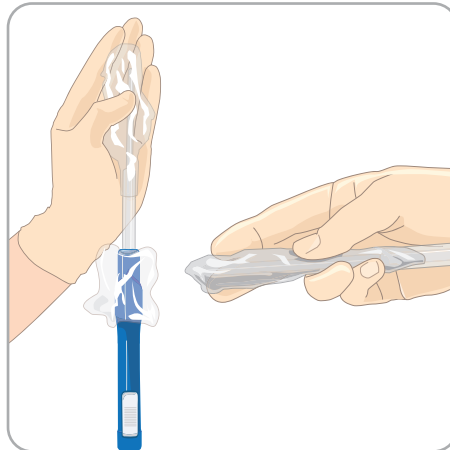


Den Uterusballon fassen und durch die gedehnte Zervix bis zum Fundus einführen oder durch die Zervix zum Fundus einfädeln.

3 Uterusballon befüllen




Sperrhähne schließen. Einen IV-Beutel und einen Dorn oder eine Spritze und Absperrhähne verwenden. Der Uterusballon sollte anfänglich mit 250 ml befüllt werden. Anschließend wird das Volumen schrittweise so lange erhöht, bis die Blutung gestoppt ist oder der Arzt feststellt, dass eine weitere Befüllung zu einer unsicheren Überdehnung des Uterus führen kann.

4 Füllmenge überwachen

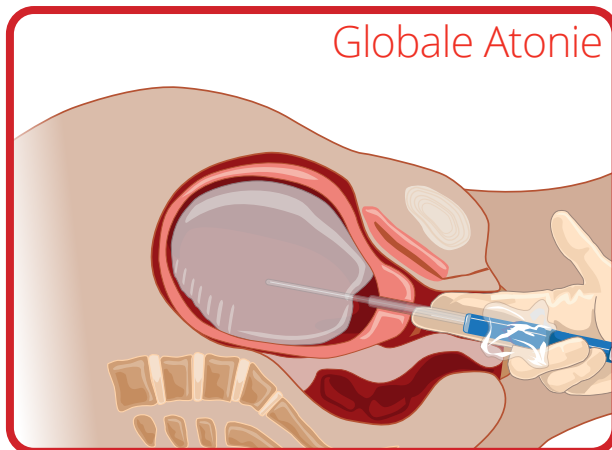

ODER

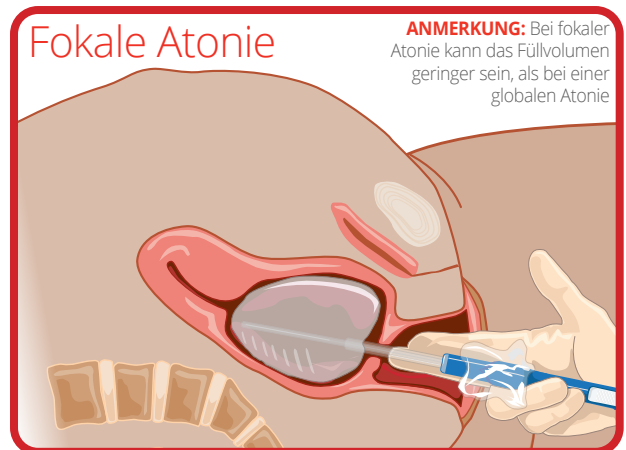


Beim Befüllen die Fingerspitzen an der Zervix belassen, um sicherzustellen, dass der Ballon in situ bleibt und nicht überfüllt wird. Sofern nicht klinisch indiziert, wird empfohlen, den Uterusballon mit maximal 750 ml zu befüllen.


5 Den Vaginalballon platzieren

6 Blutverlust beobachten


7 Entleeren und Entfernen

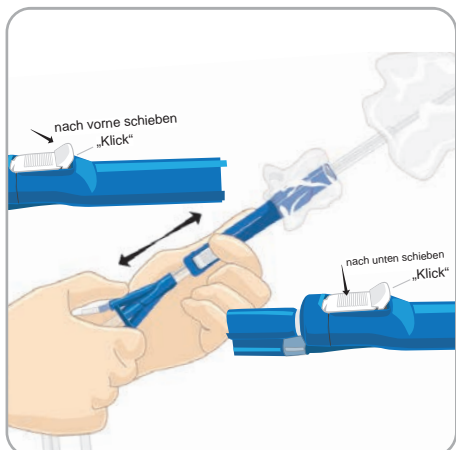

Zum Entriegeln des Schiebers den Klemmknopf nach vorne schieben, bis ein „Klickgeräusch“ zu hören ist. Den Vaginalballon in die gewünschte Position bringen. Durch Drücken des Klemmknopfs mit dem Daumen verriegeln, dann befüllen.

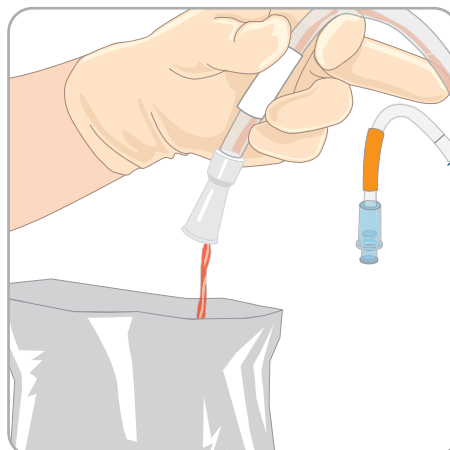


Ein Messbehälter an das Drainagelumen zur Messung und Überwachung des Blutverlusts anschließen.

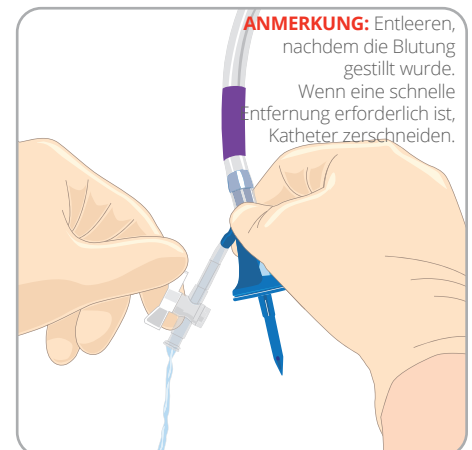

Zur langsamen Entfernung der Flüssigkeit die 2-Wege-Hähne öffnen. Gemäß dem Krankenhausprotokoll titrieren.


Kurzanleitung - Kaiserschnitt

1 Hysterotomie schließen

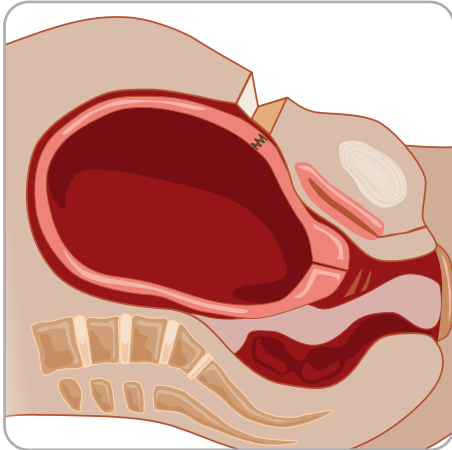


Inzision des Uterus auf die gewohnte Art verschließen.

2 Ballons zusammenfalten

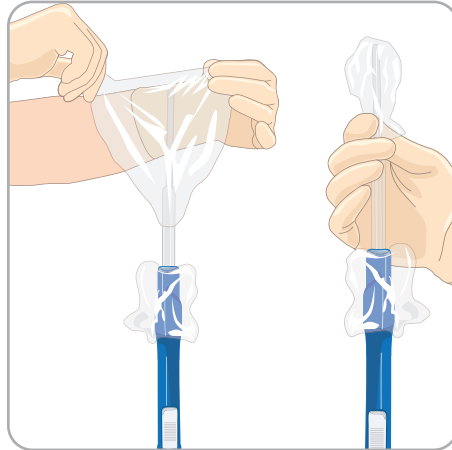

Uterusballon locker um und über die Spitze falten. Vaginalballon zusammenfalten.


3 Uterusballon einführen

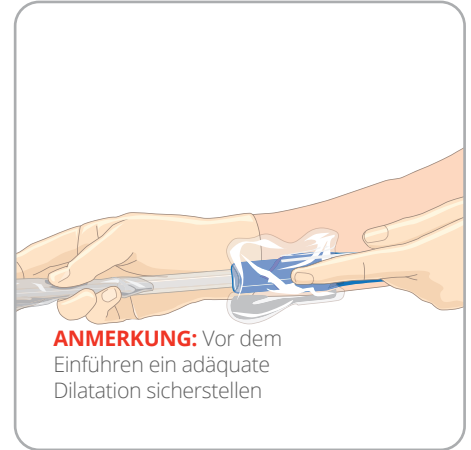

ANMERKUNG: Vor dem Einführen ein adäquate Dilatation sicherstellen


Den Uterusballon durch die Zervix zum Fundus einfädeln.

4 Uterusballon befüllen

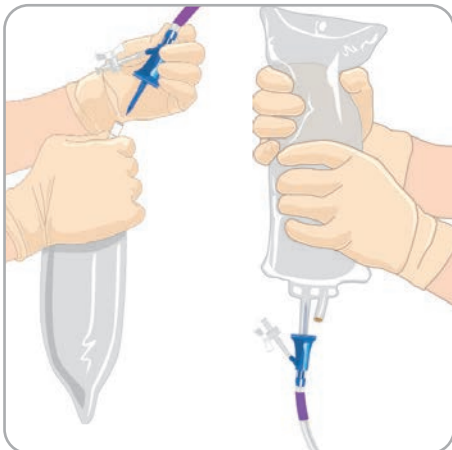


2-Wege-Hähne schließen. Die Befüllung kann entweder mit Hilfe des Einstichdorns des ebb, oder mittels einer Spritze über die 2-Wege-Hähne, erfolgen. Schrittweise bis zum gewünschten Volumen befüllen.

5 Befüllen und Überwachen

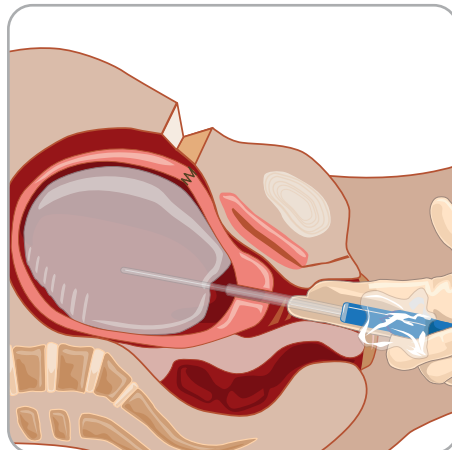


Während der Aufdehnung die Finger an der Zervix belassen. Schrittweise aufdehnen und dabei die Distension des Uterus und die Integrität der Naht(fäden) genau beobachten

6 Den Vaginalballon platzieren

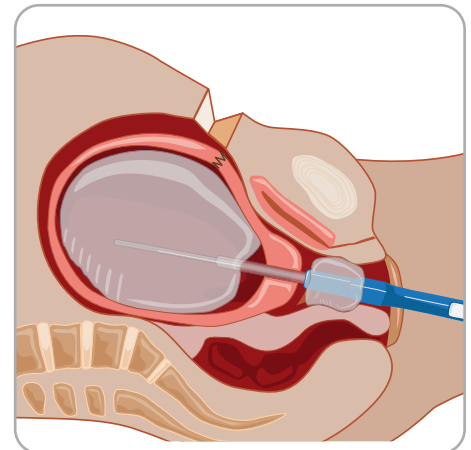


Uterusballon durch Verriegeln des Vaginalballons an Ort und Stelle halten und befüllen.

7 Laparotomie schließen

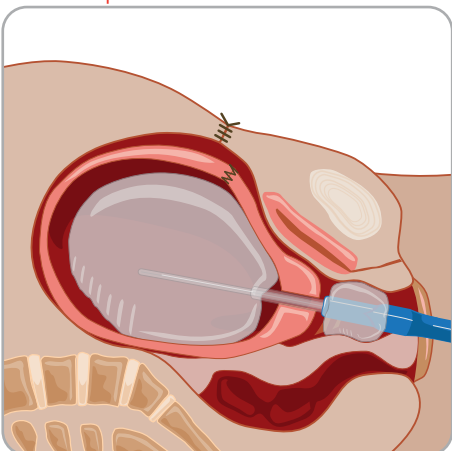

Laparotomie auf die gewohnte Art verschließen.

8 Blutverlust beobachten

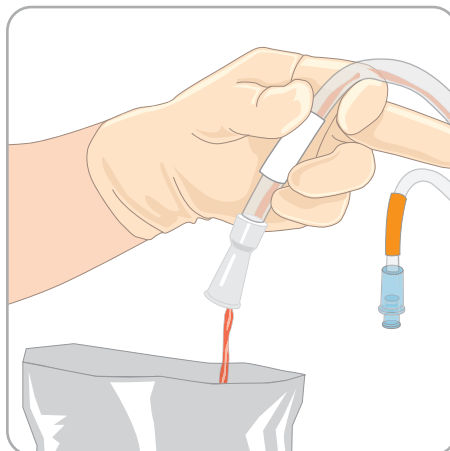

Ein Messbehälter an das Drainagelumen zur Messung und Überwachung des Blutverlusts anschließen.

9 Entleeren und Entsorgen



ANMERKUNG: Entleeren, nachdem die Blutung gestillt wurde. Wenn eine schnelle Entfernung erforderlich ist, Katheter zerschneiden.

Zur langsamen Entfernung der Flüssigkeit die 2-Wege-Hähne öffnen. Gemäß dem Krankenhausprotokoll titrieren.

Vollständige Anweisungen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen

Ihr Ansprechpartner:

clinicalinnovations.de

Clinical Innovations Germany GmbH
Wernher-von-Braun-Str. 10a
85640 Putzbrunn
Telefon 089 625 67 54 | Fax 089 625 65 54

