

# ClearView®

## Uterus Manipulator



Der ClearView® Uterusmanipulator mit einem Bewegungsumfang von 210° und einem rotierenden Handgriff erleichtert die einhändige Steuerung und ermöglicht dem Chirurgen die Gebärmutter unabhängig zu manipulieren.



### EIN UTERUSMANIPULATOR



#### Klare Sicht

ClearView bietet 120° Anteversion und 90° Retroversion sowie laterale Bewegungen für eine klare Sicht.



#### Einhändige Steuerung

Der selbsthaltende, rotierende Steuergriff ermöglicht dem Chirurgen, das Gerät ohne Assistenten zu manövrieren.



#### Zum einmaligen Gebrauch

ClearView ist vollständig entsorgbar.



#### Patientenpositionierung

ClearView dreht sich am Muttermund und ermöglicht es der Patientin in Rückenlage zu bleiben.

### ALLES IN EINER PACKUNG

ClearView ist in einer sterilen Schale verpackt und enthält alles, was Sie zur Durchführung des Verfahrens benötigen.



#### Chromopertubation

Der Farbinjektionsanschluss ermöglicht bei Bedarf eine Chromopertubation.

#### Uterussteuerung

Mit Hilfe der mitgelieferten Spritze wird der Uterusballon befüllt.

#### Einweg-Ultraschall-Dilatator

Der mitgelieferte Ultraschall-Dilatator hilft bei der Messung und Vorbereitung der Zervix.

#### Zwei Größen

Der Abstandhalter verkürzt die Spitze um 1 cm, sodass ein Instrument in zwei Größen zur Verfügung steht.

# WIRD EINE LAPAROSKOPISCHE HYSTEREKTOMIE DURCHGEFÜHRT?

## ClearView® Total

### Uterus Manipulator

ClearView® TOTAL bietet die gleichen Funktionen wie ClearView mit einem zusätzlichen vorbefestigten Okkluder-Ballon und drei unterschiedlich großen Kolpotomiecupps. Der Okkluder-Ballon verhindert den Verlust des Pneumoperitoneums, sobald die Kolpotomieinzision, während der laparoskopischen Hysterektomie, vorgenommen wird.



4 cm



3,5 cm



3 cm

## VORBEREITUNG UND VERWENDUNG VON CLEARVIEW



Oberes Ballonventil

### Ballon überprüfen

Die mitgelieferte Spritze verwenden, um den Ballon vor dem Einführen zu testen.



**HINWEIS:** Die Spitzenlänge sollte 1 cm kürzer sein als die durch Ultraschall ermittelte Länge.

### Uterus dilatieren und mit Ultraschall vermessen


Die Gebärmutter mit Ultraschall vermessen. Die Zervix ggf. dilatieren.



Oberes Ballonventil

### Produkt einführen und befüllen

Die distale Spitze mit Gleitmittel versehen und in den Uterus einführen. Langsam befüllen.

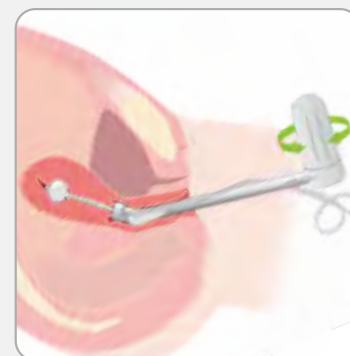

### Steuergriff

Den Griff drehen, um den Uterus zu manipulieren

Vollständige Anweisungen, Warnhinweise, Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

## PRODUKTSUPPORT

### Bestellinformationen

Produktbeschreibung	Produktcode	Packungsinhalt
ClearView Uterusmanipulator-Set – 7-cm-Spitze	UM-700	5 pro Packung
ClearView Uterusmanipulator-Set – 9-cm-Spitze	UM-900	5 pro Packung
ClearView TOTAL-Set – 7-cm-Spitze	UM-750	5 pro Packung
ClearView TOTAL-Set – 9-cm-Spitze	UM-950	5 pro Packung
Einweg-Ultraschall-Dilatator (STERIL)	DSD-1000	5 pro Packung

Lokale Vertriebsstelle:

[clinicalinnovations.de](http://clinicalinnovations.de) | [clinicalinnovations.com](http://clinicalinnovations.com)

Clinical Innovations Germany GmbH

Werner-von-Braun-Str. 10a

85640 Putzbrunn

Telefon 089 625 67 54 | Fax 089 625 65 54

[info@clinicalinnovations.de](mailto:info@clinicalinnovations.de)

© Clinical Innovations, LLC. Alle Rechte vorbehalten. | ART-0124 Rev. 01



**CLINICAL  
INNOVATIONS  
GERMANY**  
for MOM. for BABY. for LIFE.™