




1 Produkt überprüfen

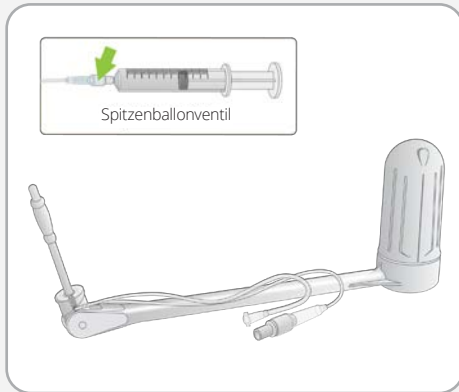

Unversehrtheit der sterilen Verpackung überprüfen. Flüssigkeit (max. 10 ml) einfüllen, um den Spitzenballon zu überprüfen, dann Flüssigkeit entfernen.

2 Uterus mit Ultraschall vermessen



HINWEIS: Die Spitzenlänge sollte 1 cm weniger als die mit Ultraschall vermessene Länge betragen.

Uteruslänge bestimmen, Produkt mit geeigneter Größe auswählen.

3 Abstandhalter anbringen*



HINWEIS: Nach unten drücken, bis der Abstandhalter einrastet.

Bei Bedarf den 1-cm-Abstandhalter anbringen.

***DER ABSTANDHALTER IST OPTIONAL**


4 Produkt einführen



HINWEIS: Die Zervix muss vor der Einführung auf 5,5 mm dilatiert werden.

Die distale Spitze mit Gleitmittel versehen und in die Uterushöhle einführen, bis der Abstandhalter am äußeren Muttermund anliegt.

5 Spitzenballon befüllen

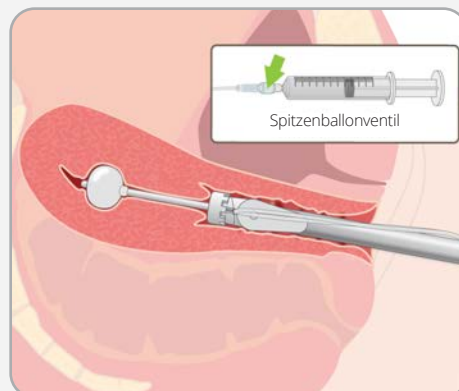

Langsam Flüssigkeit (max. 10 ml) in den Spitzenballon einfüllen, bis das Produkt fest gegen die Zervix gezogen wird.

6 Steuergriff drehen



HINWEIS: Im Uhrzeigersinn = Anteversion
Gegen den Uhrzeigersinn = Retroversion
Lateral = rechts und links

Den Steuergriff drehen, um den Uterus zu manipulieren.

7 Entfernen und entsorgen



HINWEIS: Überprüfen, ob das Produkt und der Abstandhalter (falls verwendet) intakt sind.

Die Flüssigkeit aus dem Spitzenballon entfernen, den Uterus in seine natürliche Position zurückbringen, das Produkt entfernen und entsorgen.


Vollständige Anweisungen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen



Schritte **1 und 2** entsprechen der Clearview-Kurzanleitung


3 Abstandhalter anbringen* 4 Kolpotomiecup anbringen

HINWEIS: Über die Nut nach unten schieben, dann im Uhrzeigersinn drehen, um ihn einzurasten.

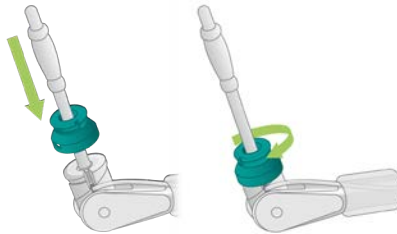

*Bei Bedarf den 1-cm-Abstandhalter anbringen.


HINWEIS: Im Uhrzeigersinn drehen, um sie einzurasten.

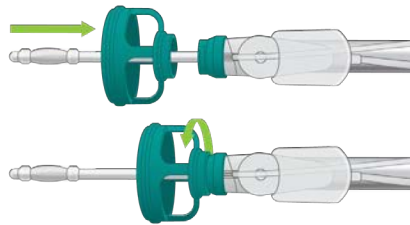

Die richtige Cupgröße auswählen und die Cup am Abstandhalter oder an der Spitzenhalterung anbringen.


5 Produkt einführen

HINWEIS: Die Zervix muss vor der Einführung auf 5,5 mm dilatiert werden. Zum Einführen können vaginale Retraktoren, ein Spekulum oder eine Repositionszange verwendet werden.

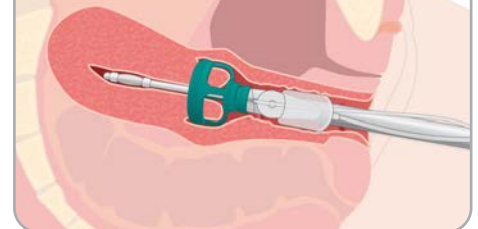

Die distale Spitze mit Gleitmittel versehen und in die Uterushöhle einführen, bis die Cup am äußeren Muttermund anliegt.


6 Spitzenballon befüllen

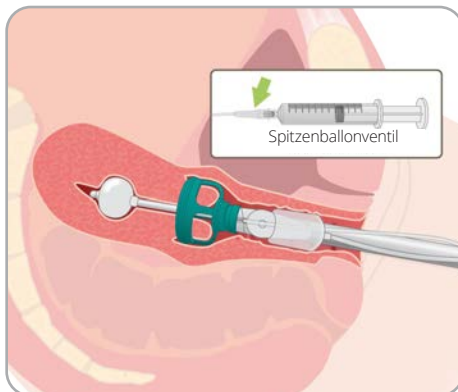

Langsam Flüssigkeit (max. 10 ml) in den Spitzenballon einfüllen, bis das Produkt fest gegen die Zervix gezogen wird.


7 Steuergriff drehen

HINWEIS:
Im Uhrzeigersinn = Anteversion
Gegen den Uhrzeigersinn = Retroversion
Lateral = rechts und links

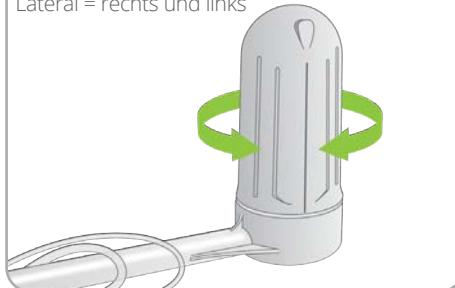


Den Steuergriff drehen, um den Uterus zu manipulieren.

8 Okkluder befüllen

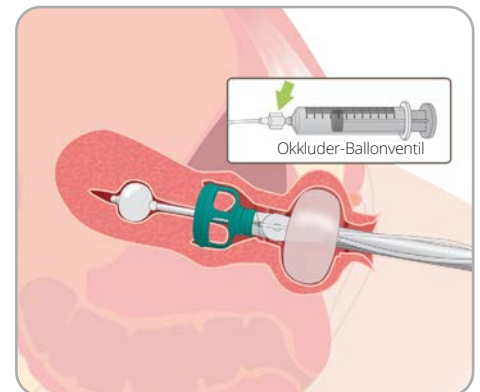

Vor der Kolpotomieinzision den Okkluder-Ballon in die Vagina vorschieben. Befüllen (60 bis 120 ml Flüssigkeit).

9 Uterusinzision

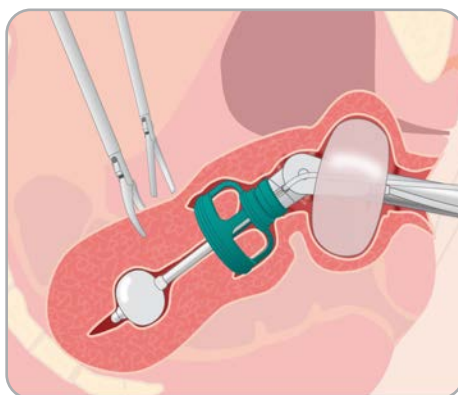

Die Uterusinzision vornehmen. Die Cup als **Sichtführung** zur Gewebebedarstellung verwenden. Die Cup **nicht** als Ablage für das Instrument verwenden.

10 Entfernen und entsorgen

HINWEIS: Überprüfen, ob der Abstandhalter (falls verwendet) und der Kolpotomiebecher intakt sind.



Die Flüssigkeit aus dem Spitzenballon entfernen, den Uterus in seine natürliche Position zurückbringen, das Produkt entfernen und entsorgen.

Vollständige Anweisungen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen

Lokale Vertriebsstelle:

clinicalinnovations.de | clinicalinnovations.com

Clinical Innovations Germany GmbH

Werner-von-Braun-Str. 10a

85640 Putzbrunn

Telefon 089 625 67 54 | Fax 089 625 65 54

info@clinicalinnovations.de

© Clinical Innovations, LLC. Alle Rechte vorbehalten. | ART-0127 Rev. 02



**CLINICAL
INNOVATIONS
GERMANY**
forMOM. forBABY. forLIFE.™